

## DT KARBID STIFTENTFERNUNGSKIT für alle MACRO-LOCK™-Stifte

Wiedereröffnung des Kanals mit RTD Wolfram Karbid Bohrer

Dieses System ist speziell für die Entfernung von Faserstiften wie die MACRO-LOCK™ und MACRO-LOCK™ ILLUSION™ X-RO™ entwickelt worden.



1. Stifentfernung mit einem runden Rosenbohrer.



2. Mittig in den Stift ein Loch mit dem Pilotbohrer bohren.



3. Einen Längenmessring auf den Wolfram Karbid Bohrer aufsetzen und den Bohrer in das vorgebohrte Loch einführen. Mit 800 bis 2000 Umdrehungen/Min. in das Loch bohren, dabei die Tiefe am Messring überprüfen; in mehreren Schritten in die Tiefe gehen. Vorsicht! Das geht sehr schnell!

Achtung: die Ausrichtung zum Wurzelkanal bewahren (via falsa!); evtl. röntgenologisch das Vorgehen überprüfen. Nicht tiefer einbohren als Ihnen die Stiflänge vorgibt.

4. Falls nötig den Kanal mit Finishing Bohrer #2 oder #3 glätten.

Achtung:

- Kein H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> benutzen um den Wolfram Karbid Bohrer zu reinigen!
- Diese Bohrer dürfen nur 3 mal benutzt werden.
- Höchste Drehzahl: 5000 Umdrehungen/Min.
- Der Gebrauch einer Lupenbrille (x5) wird empfohlen.

Die Instrumente werden unsteril ausgeliefert. Vor Gebrauch sterilisieren. Die Instrumente mit geeigneten Desinfektions- und Reinigungsmitteln für rotierende Instrumente desinfizieren. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des jeweiligen Herstellers. Die Instrumente nicht in einem Thermodesinfektor reinigen. Die Sterilisation der Instrumente erfolgt mit den bekannten Verfahren im Autoklav (134°C) oder Heißluftsterilisationsgerät (180°C). Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Geräteherstellers. Um bessere Ergebnisse zu erzielen, für jedes Instrument einen Autoklavierbeutel verwenden. Bei der Reinigung im Ultraschall dürfen sich die Instrumente nicht gegenseitig berühren. Instrumente nie feucht oder nass lagern. Instrumente vor jeder Anwendung optisch prüfen: beschädigte oder stumpfe Instrumente aussortieren und nicht mehr verwenden.

Dieses Instrument ist nur für den zahnärztlichen Gebrauch entwickelt worden. Es darf nur für diesen Zweck entsprechend der Gebrauchsanweisung verwendet werden. Der Hersteller ist nicht verantwortlich zu machen für irgendwelche Schäden, welche durch die Benutzung dieses Instrument hervorgerufen werden könnten ebenso wenig auf Grund der Herstellerinformation für dieses Instrument. Vor Benutzung dieses Instrumentes liegt es in der Verantwortung des Anwenders, sich von der Zweckmäßigkeit dieses Instrumentes für die angestrebte Behandlung zu überzeugen. Der Anwender erkennt alle Risiken, die bei der Verwendung dieses Instrumentes entstehen könnten, an.

Hergestellt von RTD, Frankreich. Vertrieb durch:  
Komira e.K. • Pommernring 47 • D-76877 Offenbach/Queich  
Tel. +49 6348 919 200 • Fax +49 6348 919 202 • info@komira.de  
www.komira.de

**komira**  
dentalprodukte